

KOD KATALOGOWY	PCO-T-02
NAZWA HANDLOWA	KOMPRESYJNE ORTEZY POSTURALNE
MODEL	PCO-T-02
CODE	PCO-T-02
TRADE NAME	POSTURAL COMPRESION ORTHOSES
MODEL	PCO-T-02



1. **PL:** Odepnij tylną część kamizelki
EN: Detach the back part of the vest.



2. **PL:** Załóż ortezę.
EN: Put the brace on.

PL: STOPNIE STABILIZACJI
EN: STABILIZATION STEPS



PL: Lżejsza stabilizacja
EN: Lighter stabilization



PL: Mocniejsza stabilizacja
EN: Stronger stabilization

- 3. PL:** Dopasuj odpowiednią kompresję ortozy za pomocą rzepów w okolicy barków i włóż panel stabilizujący.
EN: Set the required level of compression with Velcro tapes on the shoulders and insert the X-panel.

- 4. PL:** Jeżeli jest taka potrzeba to użyj dwóch paneli usztywniających (stabilizujących).
EN: If needed, use both stabilizing X-panels.



- 5. PL:** Zapnij tył ortozy za pomocą rzepów.
EN: Fasten the back of the brace with Velcro tapes.



- 6. PL:** Jeśli jest potrzeba, popraw lub dopasuj odpowiednią kompresję wyrobu.
EN: If needed, set the required level of compression again.



7. **PL:** Zapnij element stabilizujący w kroczu.
EN: Fasten the crotch stabilizing part.



8. **PL:** Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.